
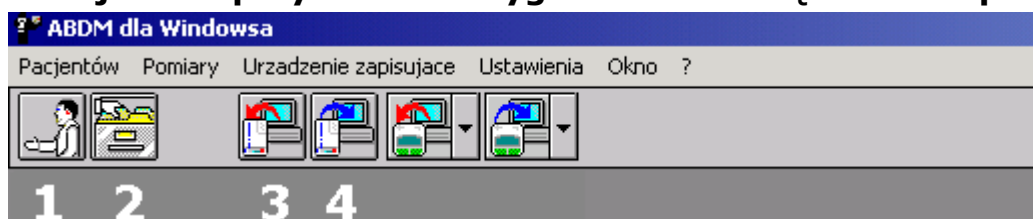




1. włącz baterie
2. **wyłączony** Mobil-o-Graph podłącz do komputera (czerwona kropka do czerwonej kropki ! )
3. włącz urządzenie (przycisk  na obudowie)  
(jeżeli na wyświetlaczu pojawi się: 'CO' znaczy to, że urządzenie „widzi” komputer, jeżeli wyświetli się godzina znaczy to, że urządzenie „nie widzi” komputera – sprawdź podłączenie kabelków)
4. uruchom program ABPM dla Windows:  
(kliknij lewym przyciskiem myszy na „ikonkę z kelnerem”)




5. kliknij pierwszy przycisk -> Nowy Pacjent
6. wprowadź dane (koniecznie: Nazwisko, Numer i Płeć)
7. kliknij trzeci przycisk -> Przygotowanie Urządzenia Zapisującego M-O-G



8. tutaj można zmienić ilość pomiarów na godzinę w poszczególnych porach
9. kliknij przycisk -> Wyślij Numer Pacjenta, {potwierdź: OK}
10. kliknij przycisk -> Wyślij Protokół, {potwierdź: OK}, {OK}
11. kliknij przycisk -> Zamknij To
12. wyłącz Mobil-O-Graph (przycisk  długo, dwa razy)
13. odłącz kabelek (delikatnie – nie wolno kręcić wtyczką)
14. załóż pacjentowi mankiet (strzałka ART. na arterii powyżej zgięcia łokcia)
15. włącz Mobil-O-Graph (powinna wyświetlić się aktualna godzina)
16. wciśnij START:  (urządzenie powinno wykonać pierwszy pomiar)

.: następnego dnia .:

17. wyłącz Mobil-O-Graph (przycisk  długo, raz) i zdejmij mankiet
18. wykonaj ponownie punkty: 2, 3 i 4 niniejszej instrukcji
19. kliknij czwarty przycisk -> Odczyt z urządzenia zapisującego
20. potwierdzamy dane, komputer odczytuje kolejne pomiary, powinno pojawić się „Przesyłanie danych zostało zakończone” {potwierdź: OK}
21. na pytanie o usunięcie danych z urządzenia potwierdź: TAK
22. potwierdź: OK godziny rozpoczęcia trybu dziennego / nocnego
23. Mobil-O-Graph można teraz wyłączyć i odłączyć (wyjmij baterie !!! ) lub przygotować dla następnego pacjenta (pamiętaj aby przed rozpoczęciem kolejnego badania zmienić baterie na nowe/naładowane)